


AmiShield 簡易操作說明 (代謝試劑盤)


開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號：001-22KA

1. 打開試劑盤鋁箔袋，取出稀釋管，加入 **0.06 mL (60 μ L)** 肝素鋰抗凝血漿或血清樣本，輕輕上下反轉使其均勻混合。

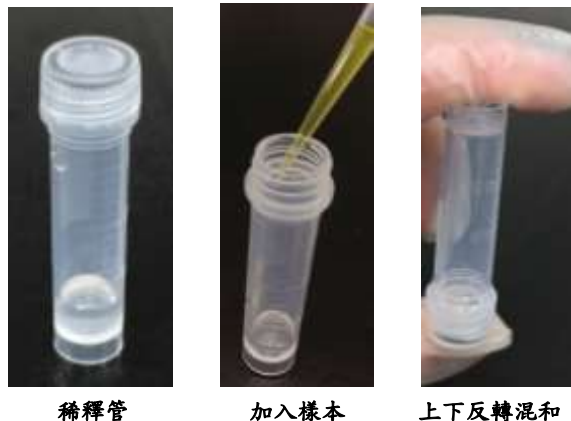

2. 將少品項試劑盤上方之壓扣環(如圖 1)，用力按下(喀一聲)，並確認壓平後無間隙(如圖 2)。

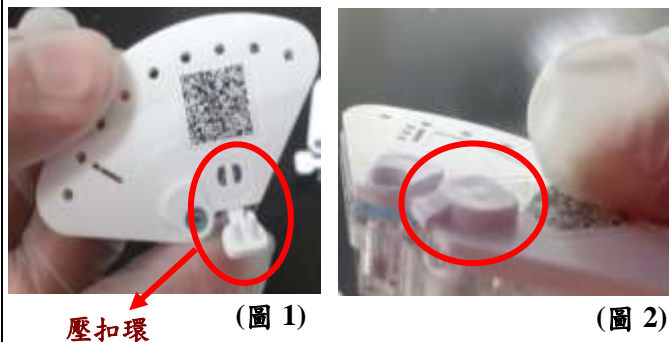


※此時請平放，避免內部液體流出，影響分析結果。

3. 一手拿穩少品項底座，另一手將少品項試劑盤以傾斜角度往中心嵌入(如圖 3)，往下壓平。依少品項底座辨識孔(紅色圓圈處)，以逆時鐘向，分別裝入 1、2、3 少品項試劑盤。並確實壓平(如圖 4)。其中一片為代謝試劑盤，另外兩片可為平衡片(Dummy)。




(圖 5)

4. 將試劑盤放入分析儀中並向中心點下壓扣好壓平後(如圖 5)，從稀釋管取已稀釋樣本 **0.06 mL (60 μ L)** 注入 T4/CHOL 試劑盤上藍色圓孔內(樣本注入孔)(如圖 6)。

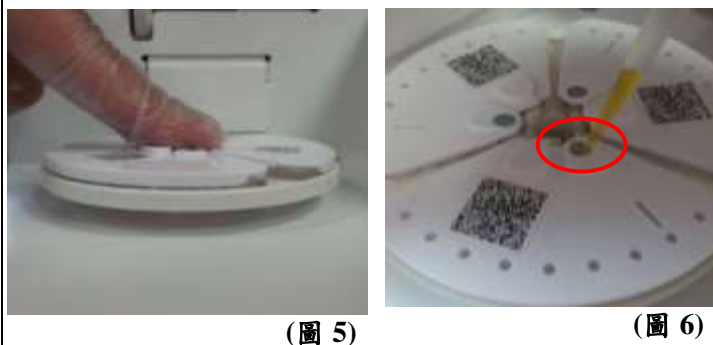

5. 注入樣本後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 7)。

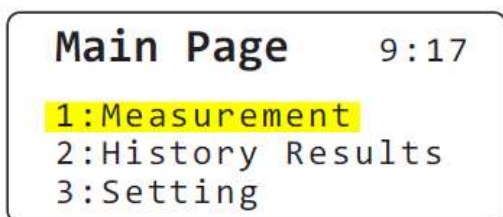

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種及注入樣本種類，確認無誤後，按壓 START 鍵(如圖 8)，分析儀即開始進行分析。

