

AmiShield 簡易操作說明 (總膽汁酸試劑盤(大))

開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號：001-11LB

1. 前置準備：打開試劑盤鋁箔袋，取出稀釋管，樣本僅能使用肝素鈣抗凝血漿或血清。



稀釋管



血漿樣本 (離心後)

2. 取出 0.17 mL (170 μ L) 肝素鈣抗凝血漿或血清樣本加入橘頭稀釋管中(如圖 1)，輕輕上下反轉使其均勻混合(如圖 2)。



(圖 1)



(圖 2)

3. 開啟分析儀檢測上蓋放入試劑盤，試劑盤需向下扣好壓平(如圖 3)。




(圖 3)

4. 將已稀釋之樣本 0.17 mL (170 μ L) 注入試劑盤上藍色圓孔內(樣本注入孔) (如圖 4)。




(圖 4)

5. 注入樣本後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 5)。

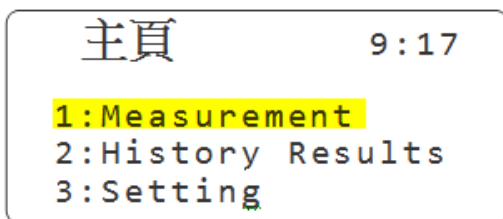

(圖 5)

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種及注入樣本種類，確認無誤後，按壓 START 鍵(如圖 6)，分析儀即開始進行分析。

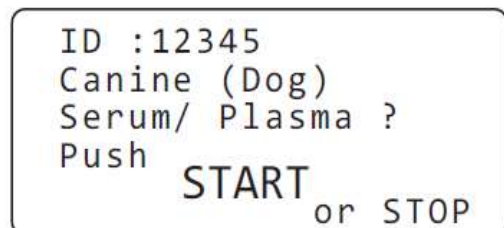

(圖 6)