

AmiShield 簡易操作說明 (氨試劑盤)

開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號：001-21LM

1. 病畜應禁食至少八小時，再採取血液樣本，將血液樣本置於肝素鋰抗凝管，20 分鐘內進行檢測，避免溶血的樣品，樣品也應避免體液、口水、汗等污染，以上均會造成偽高值。



2. 將少品項試劑盤上方之壓扣環(如圖 1)，用力按下(喀一聲)，並確認壓平後無間隙(如圖 2)。



壓扣環

(圖 1)



(圖 2)

※此時請平放，避免內部液體流出，影響分析結果。

3. 一手拿穩少品項底座，另一手將少品項試劑盤以傾斜角度往中心嵌入(如圖 3)，往下壓平。依少品項底座辨識孔(紅色圓圈處)，以逆時鐘向，分別裝入 1、2、3 少品項試劑盤。並確實壓平(如圖 4)。其中一片為氨試劑盤，另外兩片可為平衡片(Dummy)。



(圖 3)



辨識孔

(圖 4)

4. 將試劑盤放入分析儀中並向中心點下壓扣好壓平後(如圖 5)，待測肝素鋰抗凝血漿或肝素鋰抗凝全血樣本 0.06 mL (60 μL) 注入氨試劑盤藍色圓孔內(樣本注入孔)(如圖 6)。




(圖 5)




(圖 6)

5. 注入樣本後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 7)。

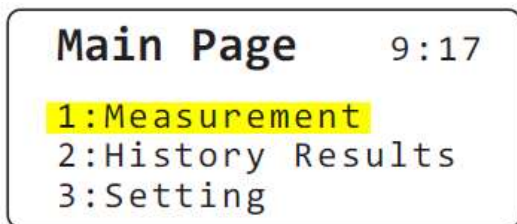

(圖 7)

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種及注入樣本種類，確認無誤後，按壓 START 鍵(如圖 8)，分析儀即開始進行分析。

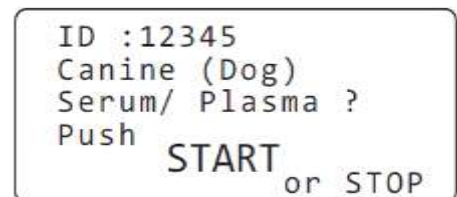

(圖 8)