

AmiShield 簡易操作說明 (果糖胺試劑盤)

開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號：001-21LQ

1. 打開試劑盤鋁箔袋，將少品項試劑盤上方之壓扣環 (如圖 1)，用力按下(喀一聲)，並確認壓平後無間隙(如圖 2)。



壓扣環 (圖 1)



(圖 2)

※此時請平放，避免內部液體流出，影響分析結果。

2. 依少品項底座辨識孔(如圖 3)，以逆時鐘方向結合，順序為 1.2.3 片(如圖 4)，將三片少品項試劑盤為一組。其中一片為果糖胺試劑盤，另外兩片可為平衡片 (Dummy)。



辨識孔 (圖 3)



辨識孔 (圖 4)

3. 一手拿穩少品項底座，另一手將少品項試劑盤以傾斜角度往中心嵌入(如圖 5)並確實壓平(如圖 6)。



(圖 5)

(圖 6)

確實壓平後間隙

4. 將試劑盤放入分析儀中並向中心點下壓扣好後(如圖 7)，將待測肝素鋰抗凝血漿或肝素鋰抗凝全血樣本 0.06 mL (60 μL) 注入果糖胺試劑盤上藍色圓孔內(樣本注入孔)(如圖 8)。




(圖 7)




(圖 8)

5. 注入樣本後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 9)。

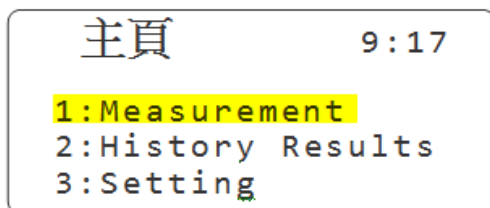

(圖 9)

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種及注入樣本種類，確認無誤後，按壓 START 鍵(如圖 10)，分析儀即開始進行分析。

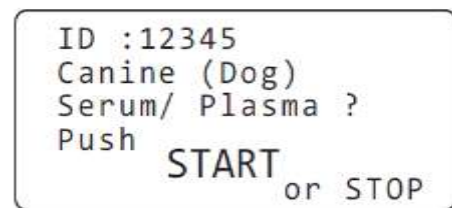

(圖 10)