


AmiShield 簡易操作說明 (全套檢查升級試劑盤)

開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號：001-3GYA


1. 樣本準備：抽血後請儘速將注射器內全血轉移到綠頭管（肝素鋰抗凝劑）(如圖 1)中，輕搖反轉 30 秒後離心(約 5,000 rpm 五分鐘)，取上清液為血漿樣本(如圖 2)。

※避免取到血球或膠體

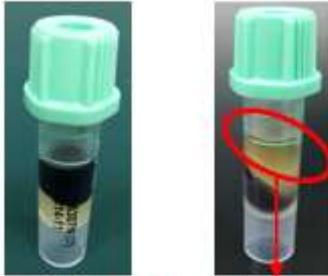

全血樣本(圖 1) 血漿樣本(圖 2)

2. 樣本吸取：請使用隨機附件之 Pipette，取出將待測肝素鋰抗凝血漿或肝素鋰抗凝全血樣本 0.13 ml (130 μL) (如圖 3)。

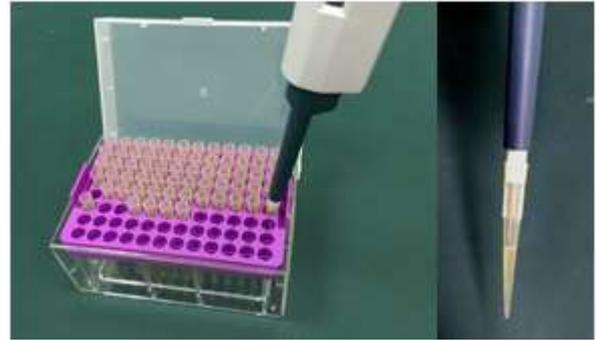

(圖 3)

3. 開啟分析儀檢測上蓋放入試劑盤，試劑盤需向下扣好壓平(如圖 4)。




(圖 4)

4. 取 0.13 ml (130 μL)樣本注入試劑盤上藍色圓孔內(樣本注入孔)(如圖 5)。




(圖 5)

5. 注入樣本後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 6)。

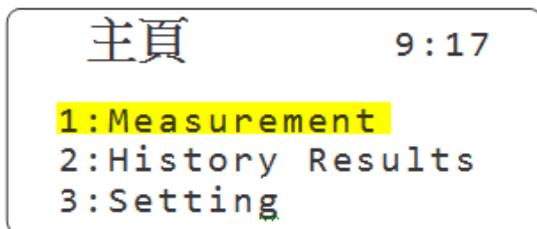

(圖 6)

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種及注入樣本種類，確認無誤後，按壓 START 鍵，分析儀即開始進行分析(如圖 7)。

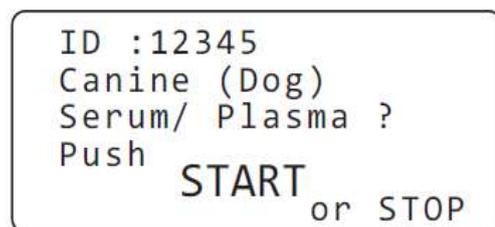

(圖 7)