


AmiShield 簡易操作說明 (全套檢查升級試劑血漿盤)

開機後，螢幕上顯示分析儀名稱及系統版本後，進行暖機

產品型號:001-3GYC/001-3EBD/001-3AFE/001-37GF


1. 樣本準備：抽血後請儘速將注射器內全血轉移到綠頭管（肝素鈣抗凝劑）(如圖 1)中，輕搖反轉檢體 30 秒後離心(約 5,000 rpm 五分鐘)，取上清液為血漿樣品(如圖 2)。

※避免取到血球或膠體

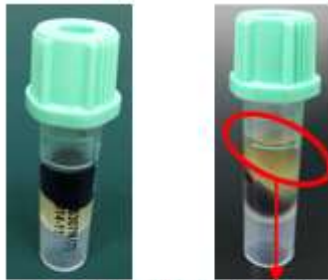

全血檢體(圖 1) 血漿檢體(圖 2)

2. 樣本吸取：請使用隨機附件之 Pipette，取出將待測肝素鈣抗凝血漿 0.06 ml (60 μ L) (如圖 3)。
 ※不得使用全血

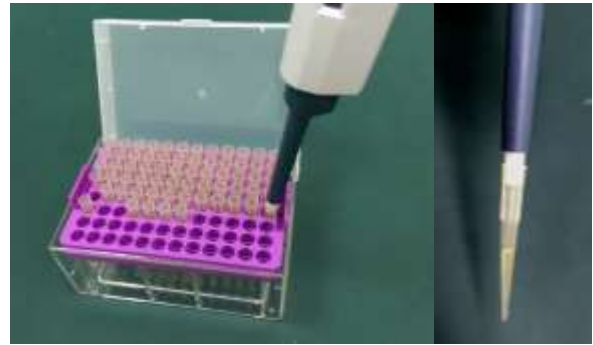

(圖 3)

3. 開啟分析儀檢測上蓋放入試劑盤，試劑盤需向下扣好壓平(如圖 4)。




(圖 4)

4. 取 0.06 ml (60 μ L)檢體注入試劑盤上樣品注入孔(如圖 5)。




(圖 5)

5. 注入樣品後，閉合檢測上蓋至主頁選項 - 選擇 1: Measurement (如圖 6)。

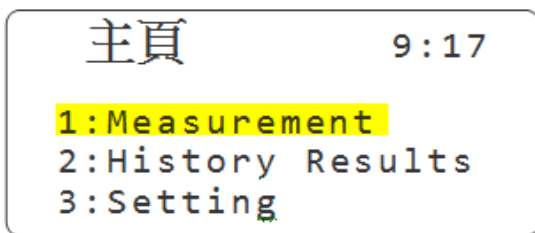

(圖 6)

6. 依螢幕指示，輸入病歷號，選擇物種，及注入樣品，確認無誤後，按壓 START 鍵，分析儀即開始進行分析(如圖 7)。

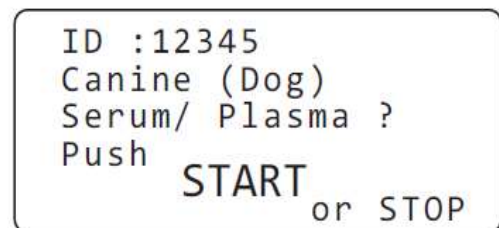

(圖 7)